

ASKIR 36BR je chirurgická odsávačka s následujícími elektrickými charakteristikami: 14 V \approx 4 A pomocí AC/DC adaptéru mod. UE60-140429SPA1 od FUHUA (vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz – 100 VA) nebo vnitřně napájené zařízení (Pb baterie 12 V \approx 4 A) nebo přes adaptér do zásuvky pro zapalovač cigaret (12 V \approx 4 A). ASKIR 36BR je stolní elektrická odsávací jednotka pro odsávání tělních tekutin, orální, nasální a tracheální aspiraci u dospělých nebo dětí. Přístroj je navržen pro snadnou přepravu a téměř nepřetržitě používání. Jednotka je ovládána elektronickým systémem řízení spotřeby, který také monitoruje provoz a stav interní baterie. Dodává se s akustickým alarmem a systémem kontrolek indikujícím nízký stav baterie a stav nabíjení baterie. Přístroj je vybaven regulátorem sání na čelním panelu a polykarbonátovou autoklávovatelnou nádobou s přepadovým ventilem. Díky těmto vlastnostem a svým funkcím je toto zařízení vhodné zejména pro následující aplikace: využití v nemocničních odděleních, pro tracheotomii nebo v pooperační terapii doma, pro odsávání tělních tekutin a pro drobné chirurgické operace.

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA



PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

PŘÍSTROJ JE URČEN PRO POUŽITÍ KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM (CHIRURG / ZDRAVOTNÍ SESTRA / ASISTENT)

DOMA SMĚJÍ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÉ OSOBY S NESNÍŽENÝMI DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI A/NEBO PEČOVATELÉ.

PŘÍSTROJ NESMÍ BÝT ROZEBÍRÁN. PRO TECHNICKÝ SERVIS VŽDY KONTAKTUJTE CA-MI SRL.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Před každým použitím zkontrolujte stav přístroje. Povrch přístroje by měl být pečlivě zkontrolován z hlediska viditelného poškození. Zkontrolujte síťový kabel a napájení a **nepřipojujte jej k síti**, pokud je patrné poškození.
- Před připojením spotřebiče vždy zkontrolujte, zda elektrické údaje uvedené na štítku a typ použité zástrčky odpovídají použité elektrické síti.
- Respektujte bezpečnostní předpisy uvedené pro elektrické spotřebiče a zejména:
 - Kvůli zaručení nejvyšší účinnosti a bezpečnosti přístroje používejte originální součásti a příslušenství dodané výrobcem.
 - Přístroj lze používat pouze s bakteriologickým filtrem.
 - Přístroj nikdy neponořujte do vody.
 - Nepokládejte a neuchovávejte odsávačku na místech, kde by mohla spadnout do vany nebo umyvadla. V případě, že k takovému nechtěnému pádu dojde, nepokoušejte se přístroj vytáhnout z vody, když je síťová zástrčka stále připojena: vypněte síťový vypínač, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte servisní oddělení CA-MI. Nepokoušejte se přístroj používat, dokud nebude důkladně zkontrolován kvalifikovaným personálem a/nebo oddělením technického servisu CA-MI.
 - Pokládejte zařízení na stabilní a rovné povrchy tak, aby nebyly blokovány přívody vzduchu nazadní straně.
 - Aby nedošlo k nehodám, nepokládejte odsávačku na nestabilní povrchy, které by mohly způsobit její náhodný pád a vést k poruše a/nebo poškození. Pokud by se objevily známky poškození plastových dílů, které by mohly odhalit vnitřní části zařízení pod napětím, **nepřipojujte zástrčku do elektrické zásuvky**. Nepokoušejte se přístroj používat, dokud nebude důkladně zkontrolován kvalifikovaným personálem a/nebo oddělením technického servisu CA-MI.
 - Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých látek, jako jsou anestetika, kyslík nebo oxid dusný.
 - Nedotýkejte se zařízením mokřými rukama a vždy zamezte kontaktu spotřebiče s kapalinami.
 - Pokud přístroj nepoužíváte, nechte jej připojený k elektrické zásuvce.
 - Při odpojování zástrčky netahejte za napájecí kabel, ale odpojte správně zástrčku ze zásuvky.
 - Přístroj skladujte a používejte na místech chráněných před povětrnostními vlivy a stranou od zdrojů tepla. Po každém použití se doporučuje přístroj skladovat ve vlastní krabici mimo dosah prachu a slunečního světla.
 - Obecně se nedoporučuje používat elektrické rozdvójky a prodlužovačky. Pokud je jejich použití nezbytné, musíte použít ty, které jsou v souladu s bezpečnostními předpisy, avšak dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximálního přípustného příkonu, který je uveden na rozdvójkách a prodlužovačkách.
- Při opravách se obraťte výhradně na technický servis a vyžádejte si použití originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení.
- Používejte pouze k určenému účelu.** Nepoužívejte na nic jiného než k účelům definovaným výrobcem. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo připojením k elektrické soustavě, která není v souladu s platnými předpisy.
- Tento zdravotnický prostředek vyžaduje zvláštní opatření týkající se elektromagnetické kompatibility a musí být instalován a používán v souladu s informacemi uvedenými v průvodních dokumentech: Zařízení ASKIR 36BR musí být instalováno a používáno mimo mobilní a přenosná RF komunikační zařízení (mobilní telefony, vysíláčky atd.), která mohou toto zařízení rušit.
- Likvidace přístroje a příslušenství musí být prováděna v souladu s platnými předpisy v zemi použití.
- VÝSTRAHA:** Na tomto zařízení neprovádějte žádné změny bez souhlasu výrobce CA-MI Srl. Žádná z elektrických nebo mechanických částí nebyla navržena tak, aby byla opravována zákaznickými nebo koncovými uživateli. Neotevírejte zařízení, nepoškozujte elektrické/mechanické části. Kontaktujte vždy technickou pomoc.
- Používání zařízení v jiných podmínkách prostředí, než které jsou uvedeny v tomto návodu, může vážně ohrozit bezpečnost a zhoršit technické vlastnosti zařízení.
- Tento zdravotnický prostředek je v kontaktu s pacientem prostřednictvím jednorázové sondy (není v dodávce s přístrojem). Odsávací hadičky pro zasunutí do lidského těla zakoupené odděleně od přístroje by měly splňovat normy ISO 10993-1

o biologické kompatibilitě materiálu.

11. Výrobek a jeho součásti jsou biokompatibilní v souladu s požadavky normy EN 60601-1.
12. Obsluha zařízení je velmi jednoduchá, a proto nejsou nutná žádná další vysvětlení kromě těch, která jsou uvedena v této uživatelské příručce.
13. Olověná baterie integrovaná v zařízení nesmí být považována za běžný domácí odpad. Tato součást musí být zlikvidována ve specializovaném sběrném středisku, aby mohla být recyklována.
14. **Použití v domácí péči:** Veškeré příslušenství přístroje uchovávejte mimo dosah dětí mladších 36 měsíců, protože obsahuje malé části, které mohou být spolknuty.
15. Nenechávejte přístroj bez dozoru na místech přístupných dětem a/nebo osobám, které mají sníženou duševní schopnost, protože se mohou ukrýt hadičkou a/nebo napájecím kabelem.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za náhodné nebo nepřímé škody, pokud bylo zařízení změněno nebo opraveno bez povolení, nebo pokud byla některá jeho součást poškozena v důsledku nehody či nesprávného použití.



Jakákoliv, i minimální úprava/oprava přístroje anuluje záruku a nezaručuje soulad s technickými požadavky stanovenými směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (v platném znění) a jejími normativy.

KONTRAINDIKACE

- Před použitím zařízení ASKIR 36BR si přečtěte návod k použití: nepřečtení všech pokynů v tomto návodu může být škodlivé pro zdraví pacienta.
- Přístroj nelze použít k odsávání hrudních tekutin.
- Přístroj nesmí být používán k odsávání výbušných, žíravých nebo snadno hořlavých kapalin.
- Přístroj ASKIR 36BR není vhodný pro MRI. Zařízení nezavádějte v prostředí MRI.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ – (směrnice 2006/66/ES)

Tento symbol na baterii nebo na obalu znamená, že s baterií dodanou s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Zajištěním správné likvidace těchto baterií pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací baterie. Recyklace materiálů přispěje k ochraně přírodních zdrojů.



Na konci jejich životnosti odevzdejte baterie do příslušných sběrných míst pro recyklaci použitých baterií. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte od místního úřadu, od společnosti zabývající se likvidací domovního odpadu či v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Model	ASKIR 36BR (REF RE 410200/03)
Typologie (Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích)	Zdravotnický prostředek třídy IIa
Klasifikace UNI EN ISO 10079-1	VYSOKÉ VAKUUM / VYSOKÝ PRŮTOK
Napájení	14 V $\overline{\text{---}}$ 4 A pomocí AC/DC adaptéru mod. UE60-140429SPA1 od FUHUA (vstup: 100–240 V~ – 50/60 Hz – 100 VA) nebo vnitřně napájené zařízení (Pb baterie 12 V $\overline{\text{---}}$ 4 A) nebo přes adaptér do zásuvky pro zapalovač cigaret (12 V 4 A)
Odběr proudu	4,0 A
Maximální podtlak (bez nádoby)	–80 kPa (–0,80 bar)
Minimální podtlak (bez nádoby)	Méně než –40 kPa (–0,40 bar) $\overline{\text{---}}$
Maximální průtok odsávání (bez nádoby)	36 l/min
Hmotnost	4,06 kg
Třída izolace (při použití s adaptérem AC/DC mod. UE60-140429SPA1)	Třída II
Třída izolace (při použití s interní baterií)	Vnitřně napájené zařízení
Třída izolace (při použití s kabelem do zásuvky pro zapalovač cigaret)	Třída II
Rozměry	350 × 210 × 180 mm
Výdrž baterie	60 minut
Doba nabíjení baterie	240 minut
Přesnost měření podtlaku	±5 %
Provozní podmínky	Teplota místnosti: 5–35 °C Relativní vlhkost vzduchu: 10–93 % Atmosférický tlak: 800–1 060 hPa
Skladovací a přepravní podmínky	Teplota místnosti: –25 až 70 °C Relativní vlhkost vzduchu: 0–93 % Atmosférický tlak: 500–1 060 hPa