

2 Bezpečnostní pokyny

Důkladně si přečtěte návod k obsluze. Přesvědčíte se tak, že systém Kanmed BabyWarmer BW3 je bezpečný a že jeho použití je snadné.

Určení

Vyhřívací systém Kanmed BabyWarmer BW3 je určen k udržení normální tělesné teploty novorozenců a předčasně narozených dětí. Přístroj je navržen výhradně pro použití v nemocnicích.

Jeho použití se musí řídit pokyny uvedenými v tomto návodu a zavedenými klinickými postupy. Přístroj smí používat výhradně kvalifikovaný personál.

Nezbytná funkčnost

Automatický systém kontroly zajišťuje přístroj proti jakékoli poruše, která by mohla ovlivnit funkci systému. Pokud se přístroj používá podle pokynů v tomto návodu a pokud se zohlední výstražné informace, není pacient vystaven nepřiměřenému riziku. Nicméně vždy sledujte vitální funkce pacienta a způsob použití upravte podle jeho aktuálních potřeb.

Varování

- **Správné použití.** Abyste zajistili optimální fungování systému a předešli nesprávnému zacházení s ním, přečtěte si před použitím celý návod. Společně s řídicí jednotkou BW3 používejte pouze originální součásti BabyWarmer od společnosti Kanmed.
- **Poruchy systému.** Pokud automatický test systému BabyWarmer BW3 neproběhne správně, pokud systém zobrazí výstražnou nebo chybovou zprávu nebo pokud dojde k pádu řídicí jednotky či k jejímu fyzickému poškození apod., musí systém před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaný technik. Při podezření, že systém BabyWarmer BW3 nepracuje správně, přístroj nepoužívejte a obraťte se ihned na kvalifikovaného technika.
- **Vyhřívací systém BabyWarmer BW3 nikdy nepoužívejte bez vodní nebo gelové matrace od společnosti Kanmed.**
- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.** Systém musí být připojen k zásuvce síťového napájení s náležitým zemněním. Před čištěním řídicí jednotky vždy odpojte kabel síťového napájení.
- **Tělesná teplota.** Systém sledování teploty slouží pouze ke zvýšení bezpečnosti. Pro přesné změření tělesné teploty pacienta však vždy používejte nemocniční teploměr se stanovenou třídou přesnosti určený k tomuto účelu a postupujte v souladu s nemocničními metodami.
- Nikdy neukládejte dítě na matraci nebo do hnízda obličejem dolů. Výjimkou jsou případy, kdy takový postup nařídí odpovědná osoba.
- Studená matrace nebo matrace vychládající po vypnutí vyhřívání sníží tělesnou teplotu dítěte. Příliš teplá matrace může zase přivodit horečku.
- Vyhřívací systém může zrychlit vstřebávání léků podávaných transdermálně (např. ve formě náplasti), což může poškodit zdraví pacienta.

Upozornění

- Denně kontrolujte, že matrace řádně těsní.
- Mějte na paměti, že zvuková výstraha pracuje s nižší hlasitostí 55 dBA, která je přizpůsobena pro použití v tichém prostředí, jako je oddělení péče o novorozence.
- Před použitím přístroje naplňte vodní matraci tak, aby hladina byla na požadované úrovni. Matraci je vhodné plnit vodou o teplotě přibližně 35 °C.
- Vodní matraci pravidelně měňte podle údaje, který je na ní poznamenán (přibližně po 12 měsících používání).
- Vyhřívací podložku neskládejte ani ostře nepřehýbejte, netahejte a nepřenašejte ji za kabel.
- Ujistěte se, že vyhřívací podložka je otočená stranou s textem směrem k matraci.
- Při použití vodní matrace se ujistěte, že v roštu lůžka jsou alespoň dva odtokové otvory.
- Aby nedošlo k poranění dítěte, ujistěte se, že stahovací šňůrka je zastrčena mimo hnízdo.
- Pravidelně kontrolujte teplotu dítěte.
- Pravidelně kontrolujte teplotu matrace.
- Neustále pečlivě sledujte životní funkce dítěte.
- Před prvním použitím veškeré součásti vyčistěte v souladu s běžnými postupy vaší nemocnice a podle pokynů uvedených v tomto návodu. Hnízdo na opakované použití před prvním použitím vždy vyperte.
- Řídicí jednotku BW3 je nutné umístit na rovný povrch nebo upevnit přední stranou nahoru tak, aby byl displej snadno čitelný.
- Jednotka BW3 není vybavena žádným rozhraním pro připojení k jinému elektronickému systému. Pokud takové propojení vytvoříte, vznikne nový „systém“, což může mít vliv na bezpečnostní klasifikaci jednotky BW3. Mějte na paměti, že při použití vysokofrekvenčních chirurgických nástrojů nebo podobných zařízení může docházet k vzájemnému ovlivňování s jednotkou BW3. To si může vyžádat zvláštní opatření ve vztahu k vyrovnávání potenciálů apod.
- Gelovou matraci není možné používat bez integrované hliníkové destičky.