

1.5 Kontraindikace

Žádné.

Kapitola 2: Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní informace

Varování:

- **Nebezpečí výbuchu:** Monitor nepoužívejte v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem, kyslíkem či vodíkem.
 - Zapnutý monitor se nesmí dostávat do blízkosti zařízení se silným vyzařováním energie, jako jsou vysokonapěťové kabely, rentgenové přístroje, ultrazvuková zařízení a elektromotory.
 - Chraňte monitor před prachem, vibracemi, korozivními a výbušnými látkami, vysokou teplotou a vlhkostí.
 - Monitor není určen pro sterilní prostory.
 - Zacházejte s ním opatrně a chraňte jej před nárazy a pády.
 - Dbejte, aby baterie používaného monitoru byly vždy dostatečně nabitě, jinak může docházet k chybám při spouštění, nepřesnostem měření apod.
-

Varování:

- Měření SpO₂ se nesmí provádět s nehty čerstvě ošetřenými odlakovačem, výsledky by nebyly spolehlivé.
- Měření a pulzní signály mohou ovlivňovat některé vnější okolnosti prostředí, chyby při aplikaci snímačů a určité stavy pacienta. Specifické bezpečnostní informace jsou shrnuty v příslušné části příručky.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, snímače a kabely než je pro přístroj předepsáno, mohlo by tím docházet ke zvýšenému vyzařování, snížení ochrany proti rušení a chybám měření monitoru.

Kontrolu se doporučuje provádět jednou za měsíc.



Upozornění: Výsledky měření monitoru jsou přesnější

v tichém a klidném prostředí.