

# 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## URČENÉ POUŽITÍ

Ohřívací boxy Kanmed modelu GE-2xxxx jsou určeny pro ohřev gelových polštářků, příkrývek, tekutin, chirurgických nástrojů a podobných předmětů, aby se omezila hypotermie pacientů a zvýšilo se jejich pohodlí. Používají se v interiéru v profesionálním zdravotnickém prostředí zdravotnickým personálem a v souladu s uživatelskou příručkou a nemocničními protokoly.

Ohřívací boxy Kanmed NEJSOU určeny pro ohřívání krevních produktů, lidské tkáně a výživových produktů.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- Upravte box tak, aby byl správně umístěn jak vertikálně, tak horizontálně.
  - **Velký box na nohách: Box musíte zajistit ke stěně pomocí zabudovaných konzol v horní části boxu.**  
Poznámka! Jestliže box není, **na vaše vlastní riziko**, zajištěn ke zdi, nevytahujte současně více než jednu polici/koš.
  - Boxy na kolečkách nejsou určeny pro přepravu nemocničních produktů. Účelem koleček je usnadnit pohyb boxu, aby se usnadnilo čištění pod ním a za ním.  
Při přemísťování boxu dbejte na to, aby kolečka nenarazila na žádné překážky. Pohybujte boxem jeho přední stranou ve směru, kterým chcete jet.
  - S boxy na kolečkách se musí pohybovat pomalu a s velkou opatrností.
  - Nikdy nevytahujte všechny police/koše současně. Pokud box nebude zajištěn ke zdi, může se překloupit dopředu.
  - Police/koše nepřetěžujte.
  - Maximální nosnost police je 20 kg.
  - Maximální nosnost koše je 20 kg.
  - Nepřepíňujte horní polici – musí být ponechán volný prostor alespoň 5 cm, aby se zajistila cirkulace vzduchu.
  - Vyvarujte se blokování větracích otvorů uvnitř boxu.
  - Dbejte na to, aby obsah dokázal odolat nastavené teplotě; v opačném případě hrozí riziko zničení obsahu a popálení pacientů.
  - Riziko popálení pacienta. Jestliže teplota vašeho boxu je nastavena na hodnotu vyšší než 42 °C, musíte zkontrolovat, zda obsah nebude příliš teplý, když se dostane k pacientovi.
  - Riziko popálení vlastní osoby. Jestliže váš box je nastaven na teplotu vyšší než 42 °C, musíte při dotýkání se obsahu a vnitřních povrchů boxu zachovávat opatrnost.
  - V boxu neohřívejte krevní produkty, lidské tkáně ani výživové produkty.
- 
- Kolečka musí být namontována podle obrázku níže.

