

## 1 Účel použití

### Účel použití

Lůžko Kanmed BabyBed je určeno k zajištění ergonomického a bezpečného uložení předčasně narozených dětí a novorozenců v nemocničním prostředí. Používá se společně se systémem pro ohřev novorozenců Kanmed BabyWarmer BW3 nebo BW-50.

Při použití lůžka je nutné, aby se personál nemocnice a osoby pečující o dítě řídily pokyny uvedenými v tomto návodu a dodržovaly zavedené klinické postupy. Lůžko Kanmed BabyBed smí používat pouze osoby, které se s těmito pokyny a postupy řádně seznámily.

## 2 Varování

- Neukládejte do lůžka dítě, které se již dokáže samo pohybovat. Hrozí pád dítěte z lůžka.
- Pokud je dítě bez dozoru, vysuňte bočnice do nejvyšší polohy.
- Nepřesouvejte lůžko ve zvýšené poloze. Před přesunem vždy uveďte lůžko do nejnižší polohy.
- Nepřesouvejte lůžko tažením za bočnice. K uchopení lůžka pro přemísťování slouží kolejnička nebo madlo.
- Pokud jsou bočnice posunuté dolů, nenechávejte dítě bez dozoru,
- Dodržujte maximální povolené provozní zatížení.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu lůžka. V případě potřeby je nutné utáhnout šrouby a zajistit kola.
- Při změně výšky lůžka dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu s jinými předměty nebo osobami v prostoru nad nebo pod lůžkem.
- Pokud nepoužíváte stanovou stříšku, odpojte její nosnou tyč.
- Nepoužívejte nosnou tyč stanové stříšky k jiným účelům.
- Pokud hrozí, že by děti, příbuzní pacientů nebo pacienti se speciálními potřebami mohli sešlápnout pedál pro nastavení výšky, odpojte lůžko od zdroje napájení. Pokud však používáte systém Kanmed BabyWarmer, zajistěte, že jeho napájení zůstane stále připojené.
- Zajistěte bezpečnou vzdálenost lůžka od ostatních prostředků, které se mohou pohybovat nahoru nebo dolů.
- Maximální tloušťka matrace je 40 mm.
- Lůžko Kanmed BabyBed smí používat pouze osoby, které se řádně seznámily s těmito pokyny a postupy.