

1 VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pohotovostní ohřívač se smí používat (popřípadě zapojovat) pouze ve vozidlech, jejichž palubní instalace odpovídají příslušným platným normám a předpisům.
- Pohotovostní ohřívač lze používat pouze v zavěšené poloze. Zařízení se nesmí používat ve vodorovné nebo nesprávné poloze. Může to vést k nebezpečné situaci, neboť se do infuzní hadičky mohou dostat vzduchové bubliny.
- Pokud zařízení spadlo nebo se na krátkou dobu dostalo do šikmé polohy, ujistěte se, že se v hadičkách nenachází žádné vzduchové bubliny.
- Ujistěte se, že infuzní láhve jsou vyrovnány svisle, přičemž výstup infuze směřuje dolů a je o 20 výše, než je katetr pacienta.
- Abyste minimalizovali riziko vniknutí vzduchových bublin do hadičky, vždy používejte infuzní set s kapací komorou nebo lapačem vzduchu.
- Ošetřující lékař musí kontrolovat stav pacienta v pravidelných časových intervalech. Nedodržení této povinnosti může vést k těžkému poškození zdraví pacienta.
- Infuzní stojany a stativy, na které se zařízení upevňuje, musí být k tomuto použití vhodné na základě jejich nosnosti a stability.
- Zařízení smí být připojeno pouze k elektroinstalacím, které odpovídají aktuálním platným normám a předpisům.
- Ve spojení se zařízením ESH 04 se smějí používat pouze originální díly dodané společností BIEGLER: Síťový adaptér 30 W E2EFMW3, napájecí port 12 V.
- Zařízení lze bezpečně odpojit od sítě pouze vytažením síťové zástrčky. Síťový adaptér připojujte pouze ke snadno přístupným zásuvkám, aby v případě potřeby bylo umožněno rychlé odpojení od sítě.
- Zařízení se nesmí používat, vykazuje-li síťová zástrčka známky poškození.
- Zařízení se nesmí používat v místnostech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.

- Opravy a modifikace zařízení a výměny akumulátoru smí provádět pouze osoby a servisní střediska pověřené společností BIEGLER.
- Opravy a údržbu neprovádějte za provozu.
- Zařízení se nesmí ponořovat do kapaliny ani sterilizovat párou nebo termochemickou metodou.
- Všechny cizí vlivy, jako např. elektromagnetické záření nebo vysoké teploty, je nutné co nejvíce omezit.
- Baterii zařízení nabíjejte pouze za podmínek prostředí, které jsou stanoveny pro provoz. (Viz kapitolu 13.)
- Infuzní roztoky před vložením do zařízení nepřehřívejte na více než 55 °C.
- Zařízení může být ovlivňováno jinými zařízeními umístěnými v jeho blízkosti, popř. může samo tato zařízení ovlivňovat. Podléhá zvláštním bezpečnostním opatřením týkajícím se elektromagnetické kompatibility (EMC). Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení mohou ovlivňovat zdravotnické elektrické přístroje.
- Při práci s tímto zařízením a jeho příslušenstvím je nutno vyvarovat se násilného zacházení.
- Pokud dojde k pádu, mechanickému poškození nebo chybné funkci zařízení popsané v návodu k použití, ihned zařízení vyřadte z provozu a zašlete je servisní službě.
- Pravidelné bezpečnostní technické kontroly provádějte podle kapitoly „Pravidelné kontroly“.